



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПОСЛОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНЕКТБИОФАРМ В СЛУЧАЕ ПРЕЗЕРВАЦИИ (КОНСЕРВАЦИИ) ЛУНКИ

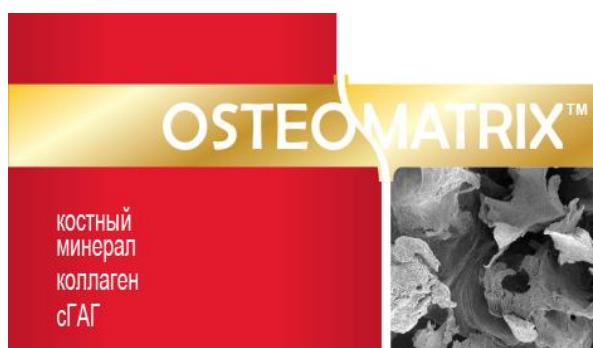

ОСТЕОИНДУКТОР

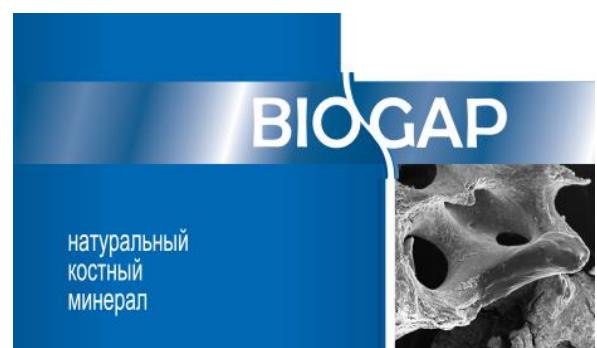


ОСТЕОКОНДУКТОР




МЕМБРАНА

ПРИМЕР ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ ЗДОРОВОГО ЗУБА

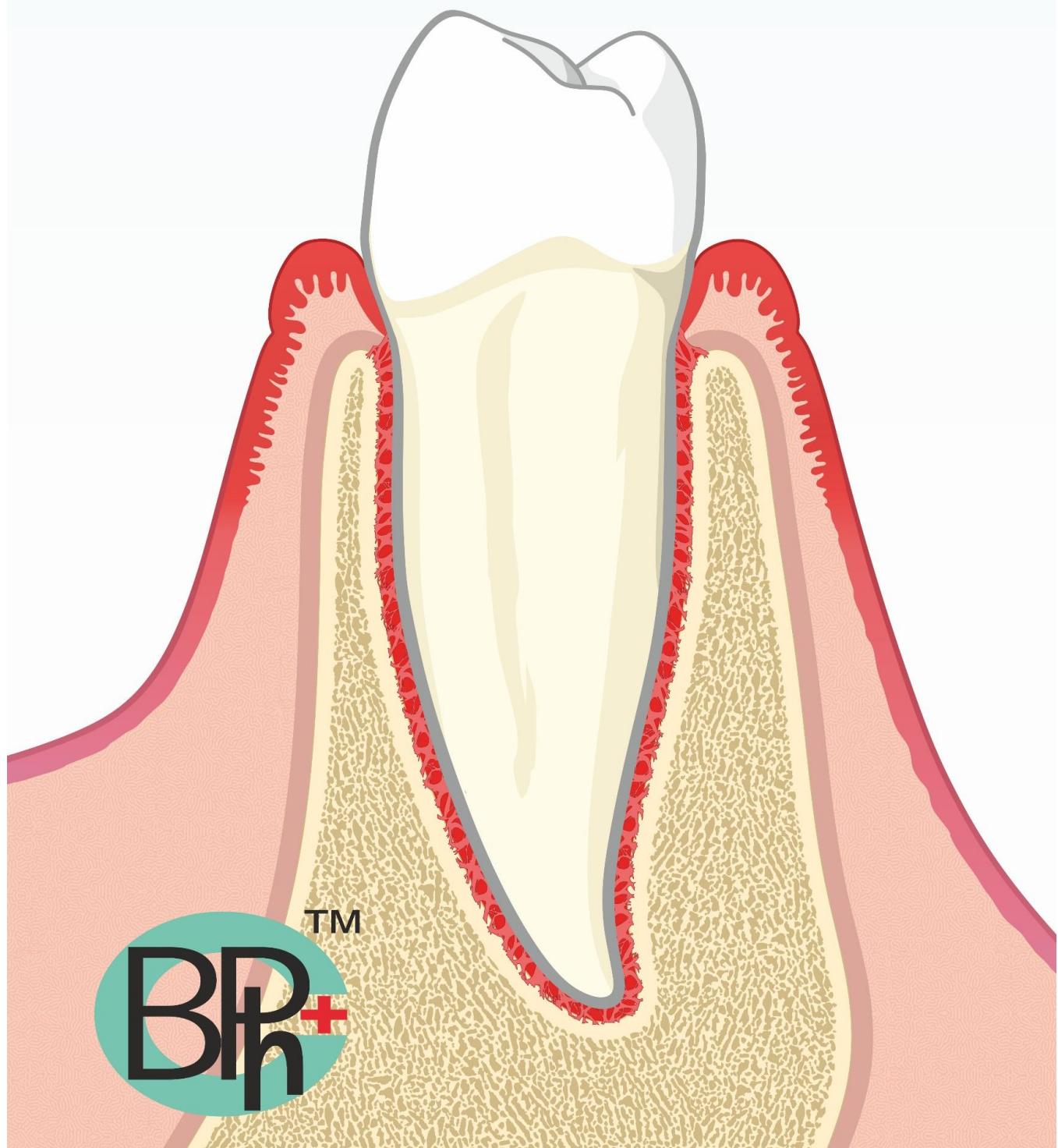


ПОКАЗАНИЕ К УДАЛЕНИЮ ЗУБА

нецелесообразность терапевтического лечения

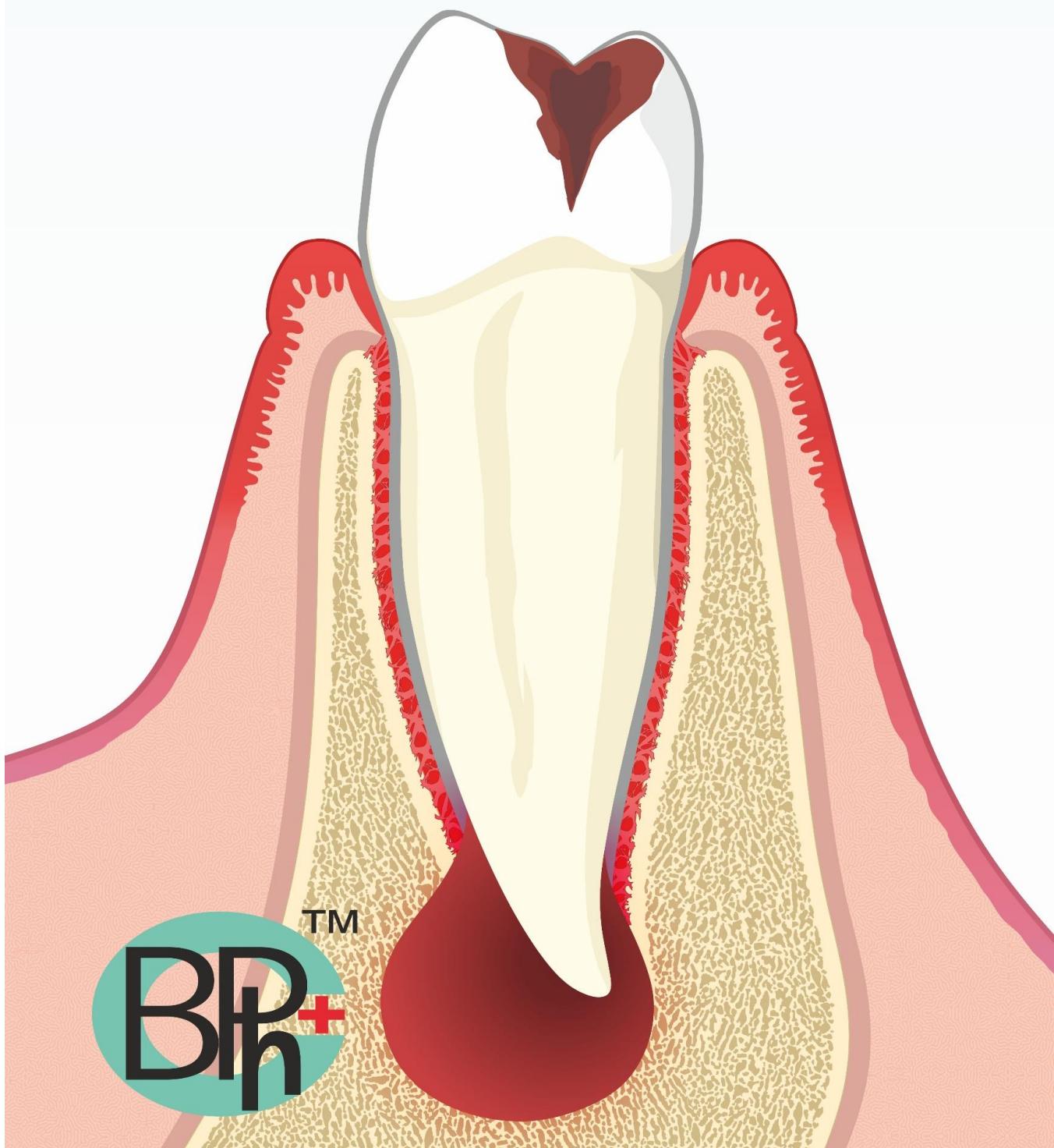


**ПРОВОДИМ СЕПАРАЦИЮ СЛИЗИСТОЙ ВМЕСТЕ
С НАДКОСТНИЦЕЙ**


чуть ниже уровня прикрепленной слизистой

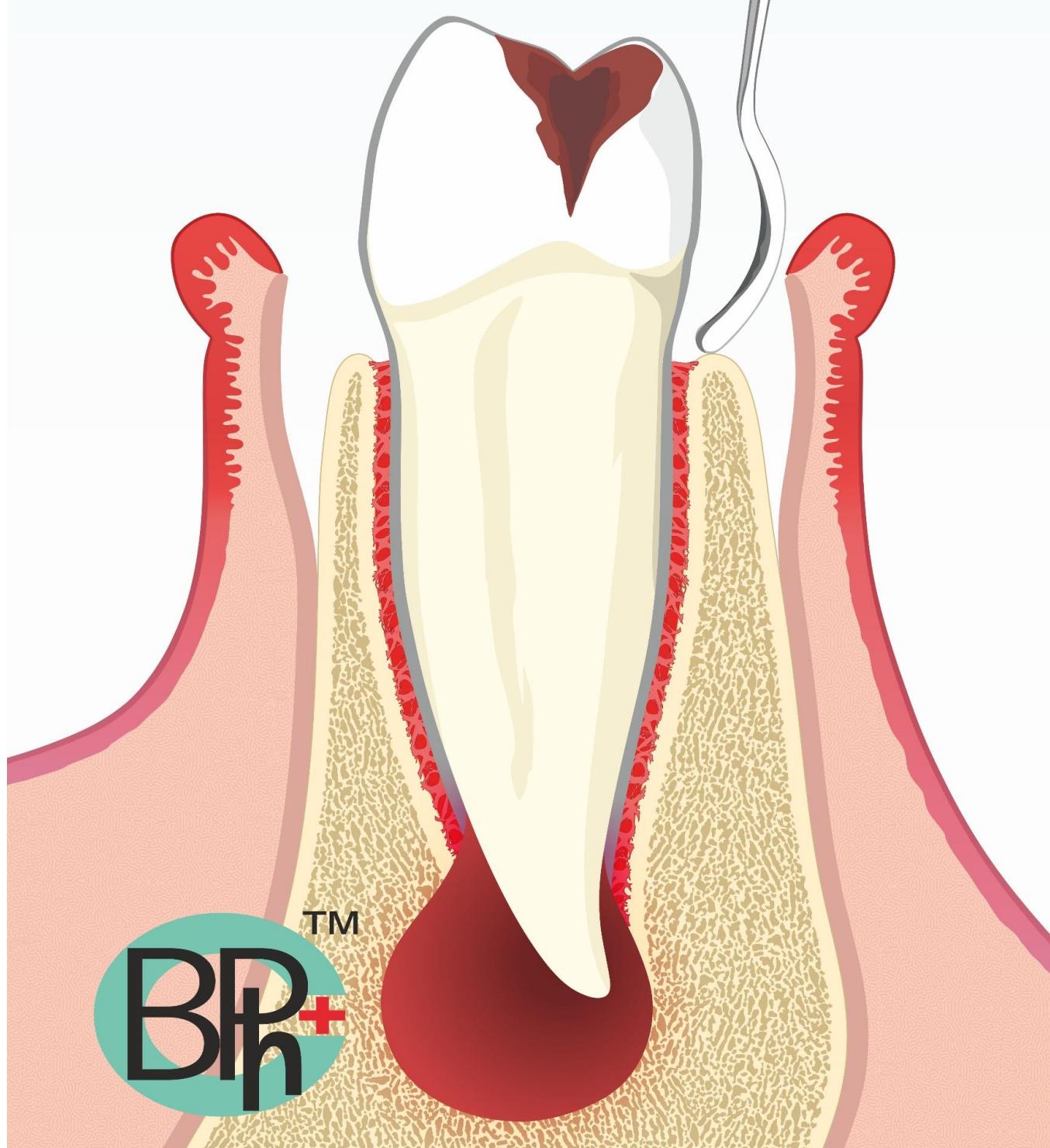

ВИД ЛУНКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

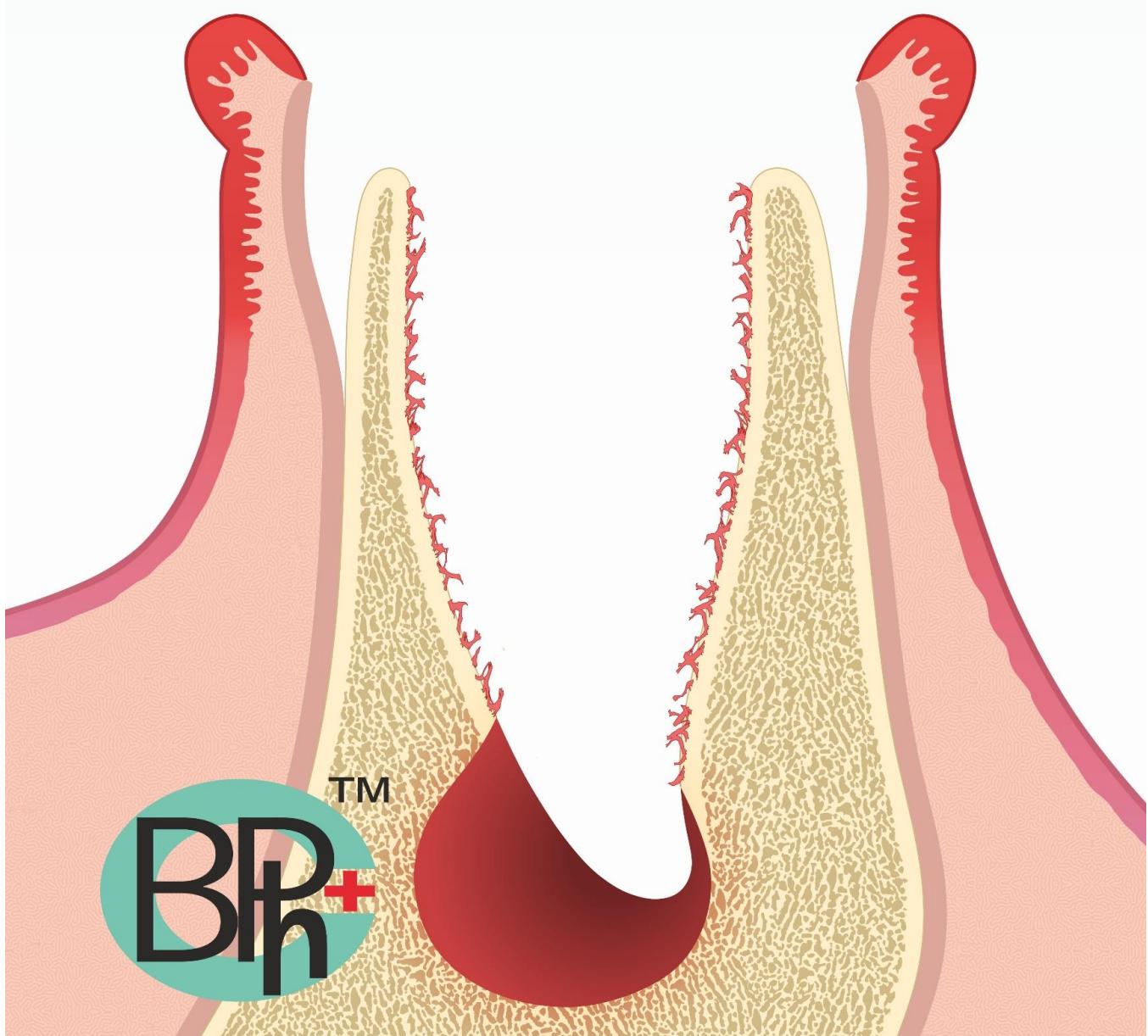

ПРОВОДИМ ПЕРВИЧНЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ

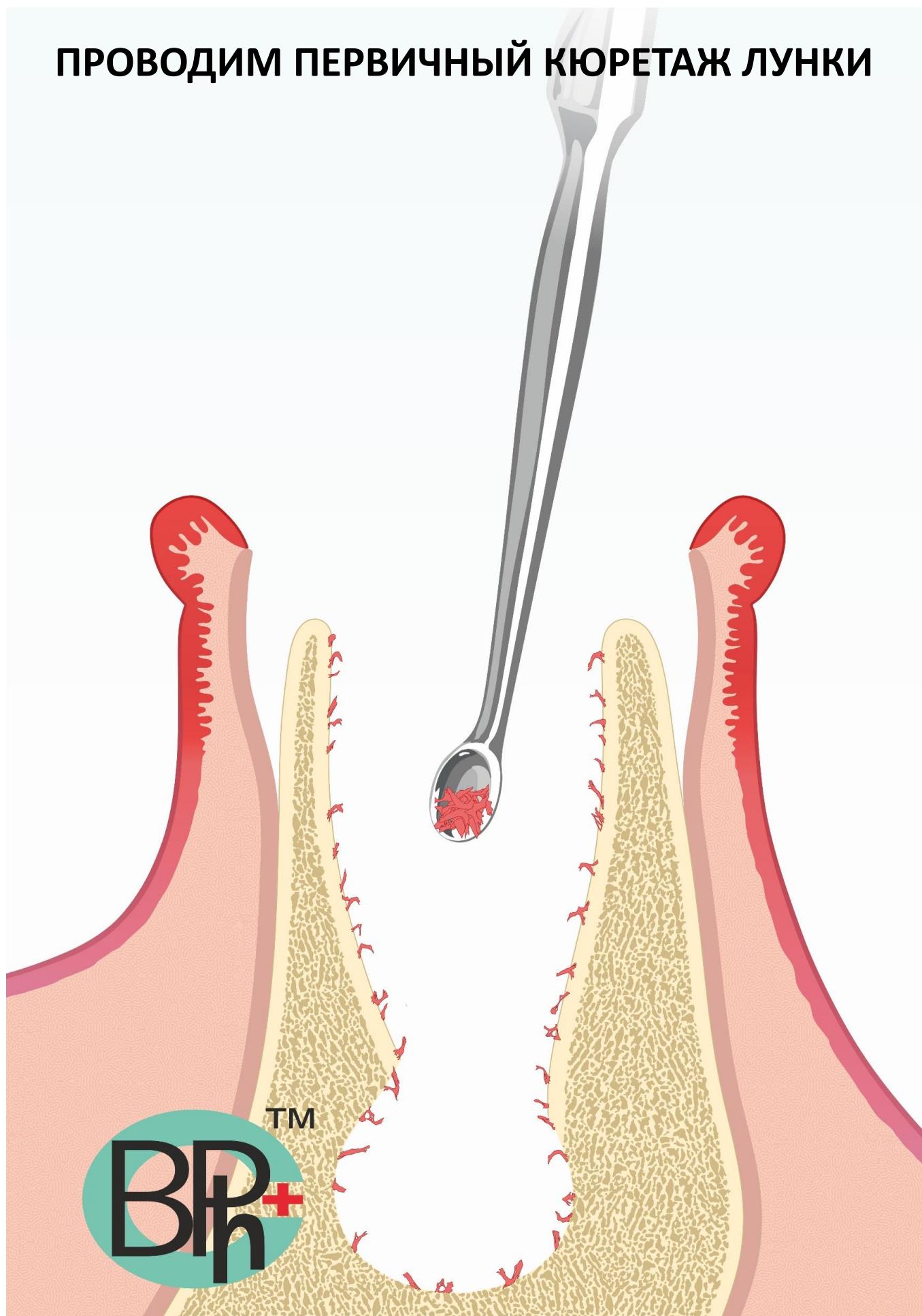

ПРОВОДИМ ОБРАБОТКУ ЛУНКИ
АНТИБИОТИКАМИ С ЦЕЛЬЮ САНАЦИИ
З ЭКСПОЗИЦИИ ПО 1 МИНУТЕ




ДОКСИЦИКЛИН
10% раствор ДИМЕКСИДА

ПЕРЕЙТИ К
ПРОСМОТРУ
ВИДЕО ПО
САНАЦИИ РАНЫ





ПОВТОРНЫЙ КЮРЕТАЖ ЛУНКИ ПОСЛЕ САНАЦИИ РАНЫ


рекомендовано между 2 и 3 экспозицией

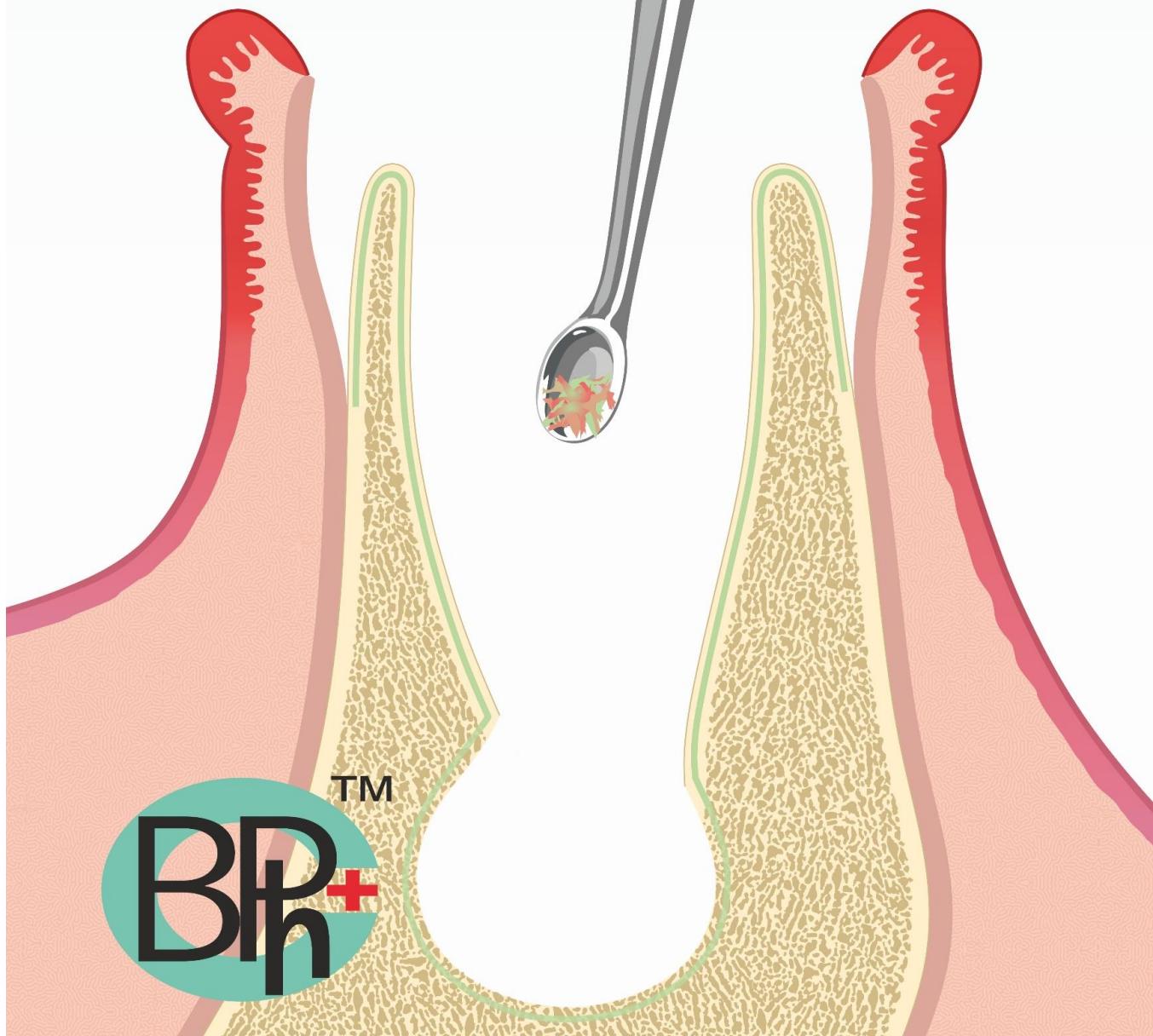


ЗАПОЛНЯЕМ ЛУНКУ ОСТЕОИНДУКТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ

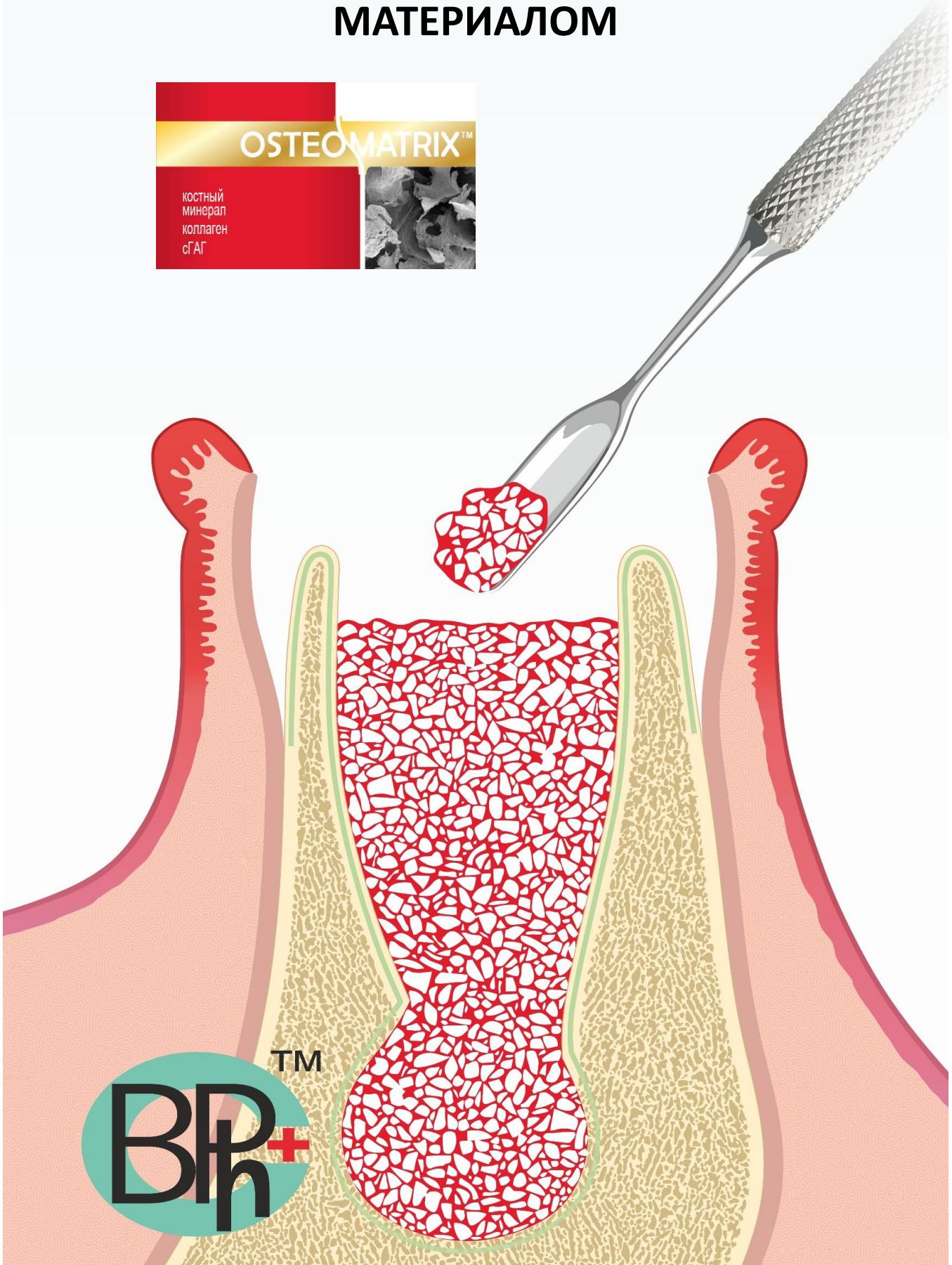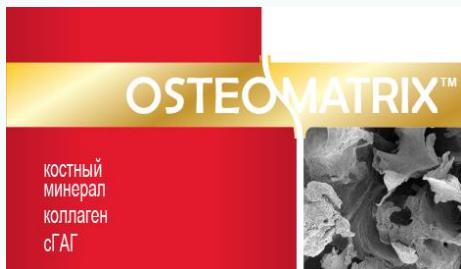


ВНОСИМ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ОСТЕОКОНДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА

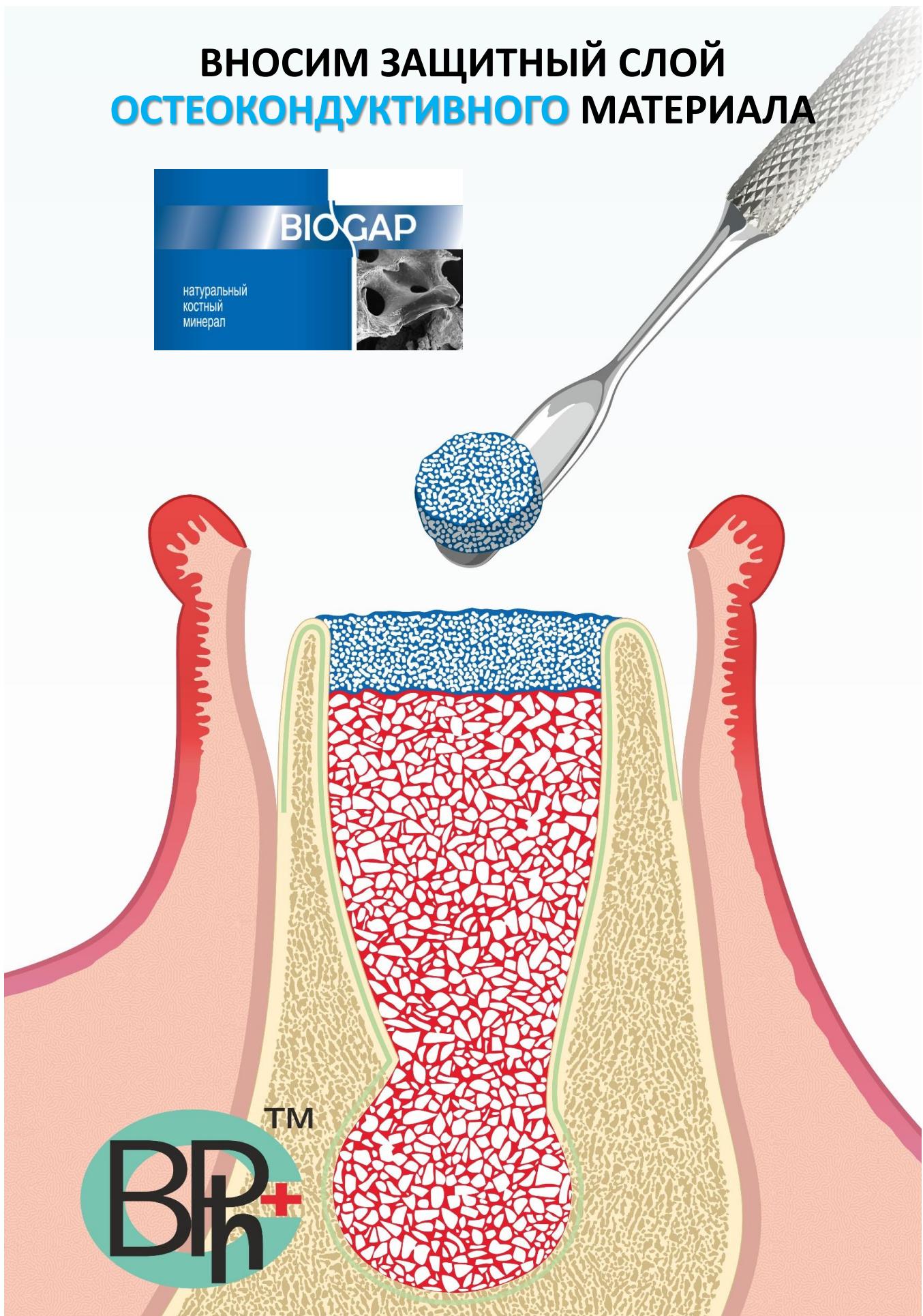

ПРЕДОТВРАЩАЕМ МИГРАЦИЮ КОСТНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОМОЩИ РЕЗОРБИРУЕМОЙ КОЛЛАГЕНОВОЙ МЕМБРАНЫ

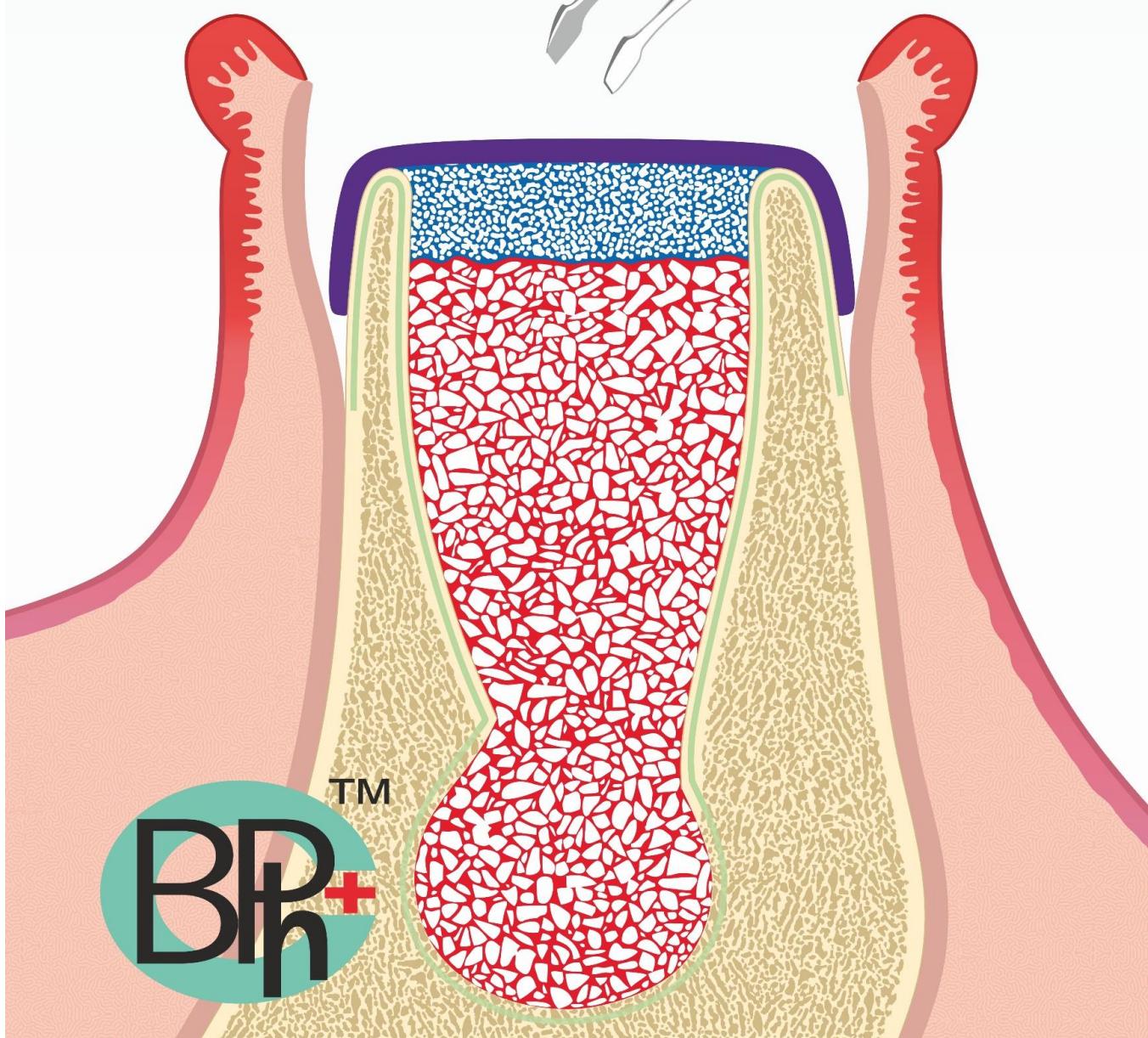


УШИВАЕМ РАНУ

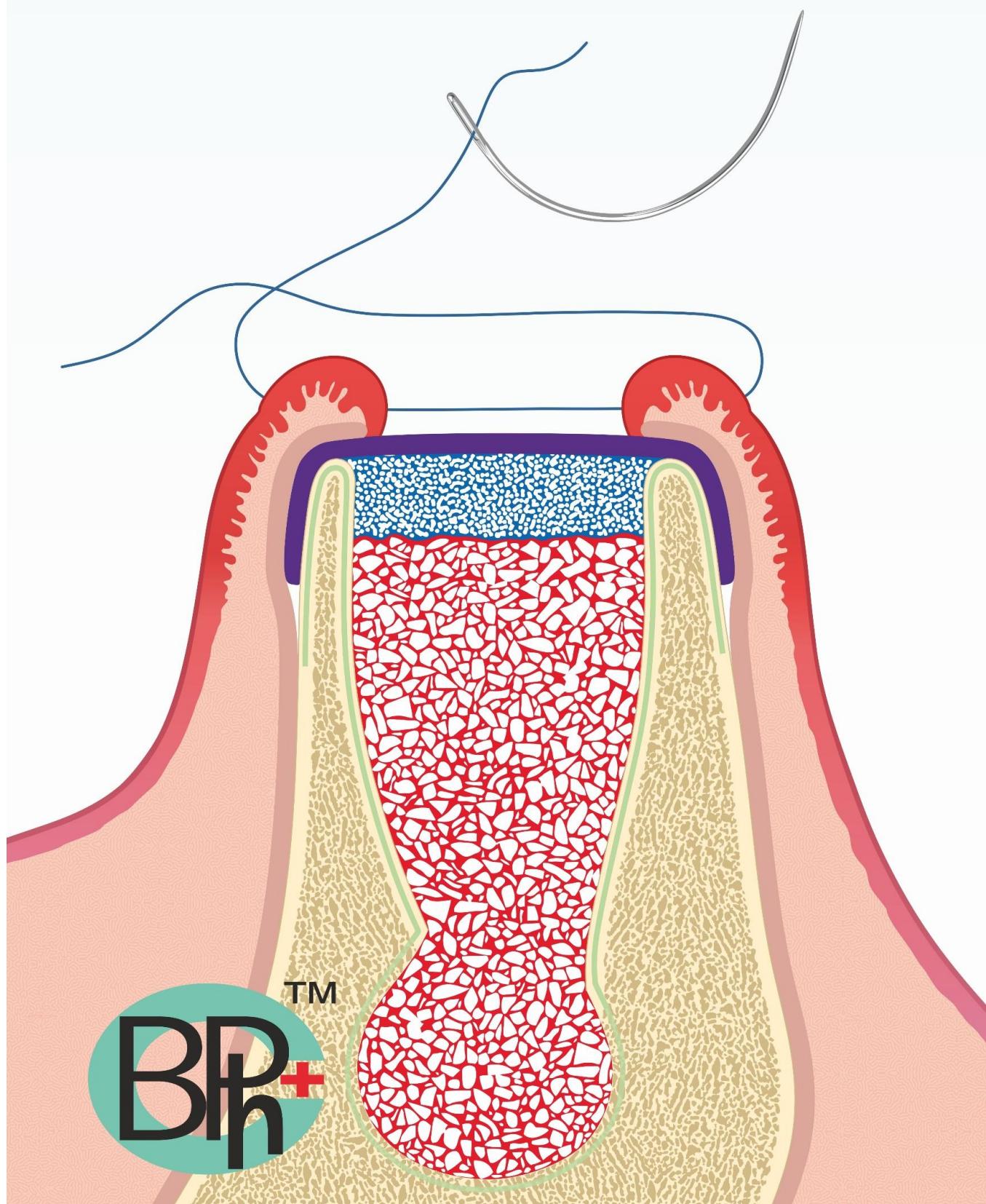

ВАРИАНТ УШИВАНИЯ РАНЫ ПРИ РАЗРЫВЕ СЛИЗИСТОЙ




СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗДЕСЬ

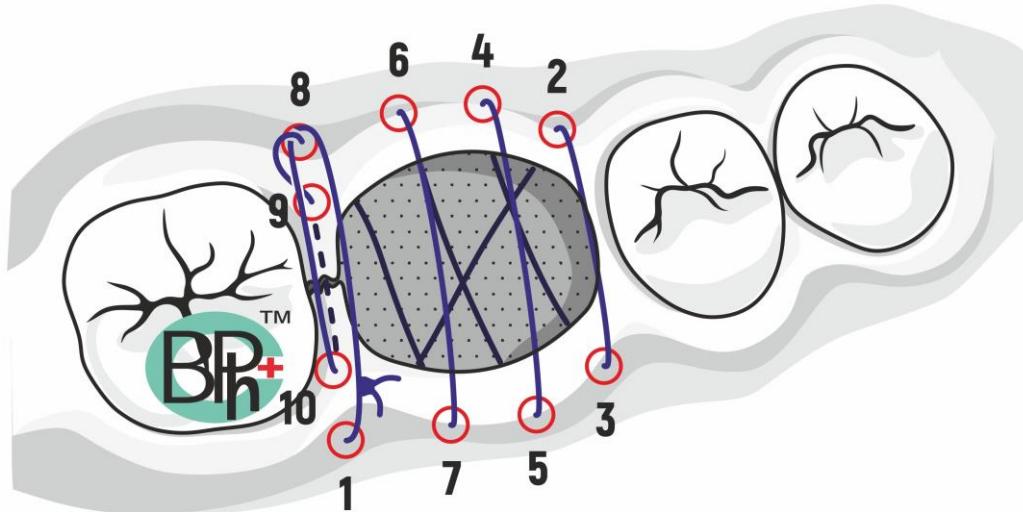

ВАРИАНТ УШИВАНИЯ РАНЫ БЕЗ РАЗРЫВА СЛИЗИСТОЙ



СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПРОТОКОЛ ЗДЕСЬ

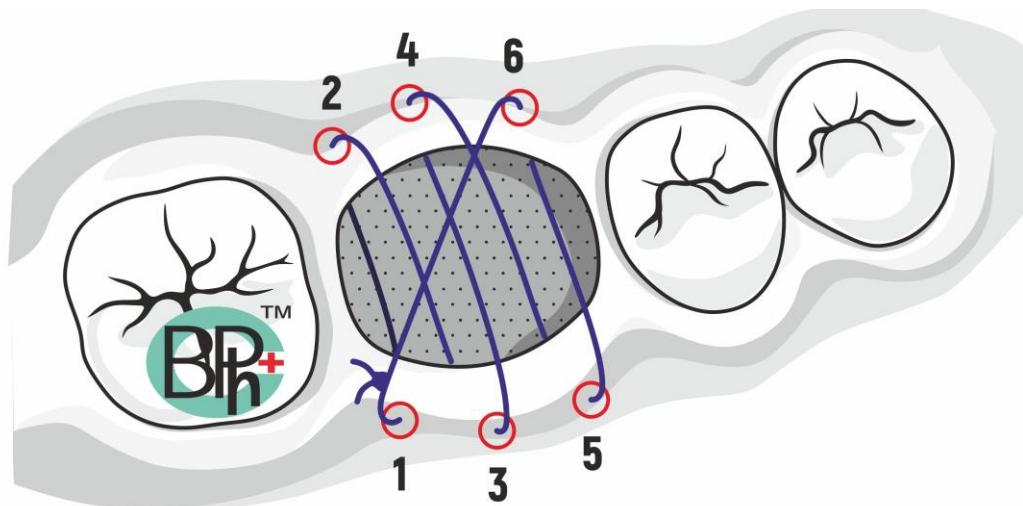

ОТДАЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

через 6 месяцев

